



HYGIENE DU NETIFLOW®

Rédigé par le groupe de travail Aérosols du réseau EMERAA

Version n° 2

Date : 06/2018

Ce dispositif est un objet personnel.

Après chaque utilisation, il doit être lavé au savon liquide, rincé abondamment, TRES bien séché puis stocké dans un endroit sec.

Régulièrement, au moins une fois par semaine, afin d'éviter la contamination par des bactéries, procéder à une désinfection.

Consignes de désinfection préconisées par le Laboratoire de la Mer :

(le réseau EMERAA se fait le relais de leurs recommandations)

- A chaud : à l'aide d'un « stérilisateur » à biberon
- A froid : avec des pastilles effervescentes à faire dissoudre dans de l'eau